



# COVID-19 IgM/IgG Kit Rapido

www.ulsmedicalsupplies.com

#### ESPECIFICACION TÉCNICA

#### **NOMBRE**

COVID-19 IgM/IgG Rapid Kit

#### **TIPO DE PRUEBA**

PRUEBA DE SANGRE RÁPIDA SEROLÓGICA

#### **CERTIFICACION**

CE, GMP, ISO, (FDA solicitud de aprobación de emergencia)

#### RESUMEN

El kit rápido COVID-19 IgM / IgG es un indicador de detección suplementario para casos sospechosos con detección negativa de ácido nucleico, o junto con el PCR en el diagnóstico de casos sospechosos

#### **ESPECIFICACION**

Item	Especificacion
Objetivo de detección	SARS-CoV-2
Tecnología de detección	Prueba de sangre rápida serológica
Tipo de muestra	10μL de sangre , suero oplasma
Resultados de la prueba	10-15 minutos
Exactitud	97% de sensibilidad y especificidad

#### **CARACTERISTICAS**

- Rápido y fácil de usar en caso de emergencia.
- Detectar y diferenciar anticuerpos IgM / IgG específicos para SARS-CoV2.
- Requiere un pequeño volumen de muestra (10 µL de sangre completa, suero o plasma).
- No se necesita equipo especial o capacitación.


#### INFORMACIÓN LOGÍSTICA

- Condición del embalaje:
  - Una caja pequeña = Un kit = 25 pruebas
  - Un Cartón o caja grande = 32 kits = 55x41x41 cm
  - o Peso Total por cartón 17.50 Kg.
  - Caja de Embalaje:
    - o Tamaño de Una paleta 110x110x12 cm
    - Una paleta = 12 Cartones.
- Temperatura de almacenamiento: 1-40 °C (34-104°F)
- Vida útil: 12 meses.
- Componente del kit:
  - Cassete de Prueba
  - Pipeta capilar desechableUn tubo de solución tampón
  - o Intrucciones de uso



# COVID-19 lgM/lgG Kit Rápido

### METODO DE LA PRUEBA

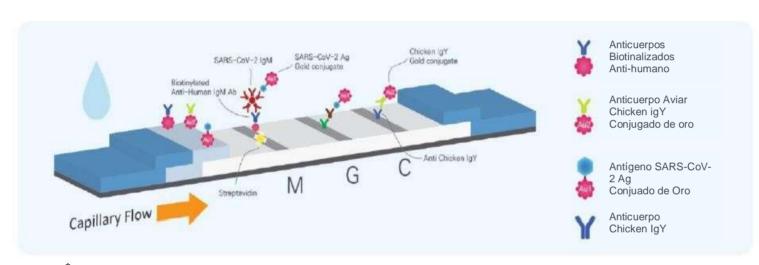

Înmunocromatografía de oro coloidal

## **Procedimiento y Resultados**





### Rendimiento Clínico

SARS-CoV-2	careUS™ COVID-19 IgM/IgG
Sensibilidad clínica (IgM and/or IgG)	93.6% (95% CI: 82.8% ~ 97.8%)
Especificación Clínica	98.0% (95% CI: 89.5 ~99.6%)

- De 47 muestras positivas de SARS-CoV-2 confirmadas por RT-PCR, el kit rápido COVID-19 IgM / IgG detectó 44 muestras positivas (93,6%).
- De 50 muestras negativas de SARS-CoV-2 confirmadas por RT-PCR, el kit rápido COVID-19 IgM / IgG mostró una especificidad del 98.0%

www.ulsmedicalsupplies.com